

Właściwości, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze rękawic to:

- tworzywo, z którego jest wykonana,
 - ocena warunków pracy,
 - dobór odpowiedniego rozmiaru.

Przed założeniem rękawic należy pamiętać o dokładnym umyciu rąk, a następnie zdezynfekowaniu. Rękawice należy ubierać na wyschniętą skórę.

Przy higienie rąk należy stosować się do wytycznych WHO:

- krótko obcięte paznokcie,
- brak wyciętych skórek,
- brak biżuterii na rękach,
- brak sztucznych i lakierowanych paznokci.

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA RĘKAWIC



Ryc.1



Ryc.2



Ryc.3



Ryc.4

1. Otwórz pudełko w wyznaczonym miejscu. Pobierz rękawice z opakowania. (ryc. 1)
2. Trzymając rękawicę za mankiet, naciągnij na przeciwną dłoń do tej, która wyciągnęła rękawicę z opakowania. (ryc. 2, 3, 4)
3. Za pomocą ręki, na której posiadasz już rękawicę wyjmij drugą i powtórz czynność. (ryc. 1, 2, 3, 4)

INSTRUKCJA ŚCIĄGANIA RĘKAWIC



Ryc.1



Ryc.2



Ryc.3



Ryc.4



Ryc.5

1. Chwyc palcami rękawicę na wysokości nadgarstka w taki sposób, by nie dotykać skóry przedramienia. (ryc. 1)
2. Jednym ruchem ściągnij rękawicę wywracając ją wewnętrzną stroną na wierzch. Po zdjęciu pierwszej rękawicy należy trzymać ją w drugiej ręce. (ryc. 2)
3. Wsuń palec między mankiety rękawicy, a nadgarstek i ściągnij w dół poprzez wywrócenie na drugą stronę. Pierwsza rękawica powinna znaleźć się wewnątrz drugiej. (ryc. 3, 4)
4. Wyrzuć obie zdjęte rękawice traktując jako odpad medyczny. (ryc. 5)

INFORMACJE ALERGICZNE

Składniki użyte do wyprodukowania mogą u niektórych osób powodować reakcje alergiczne. Jeśli się takie pojawią prosimy o zaprzestanie używania produktu i zasięgnięcie porady lekarza.

ŚRODKI CHEMICZNE

Guma nitylowa. Nie zawiera lateksu naturalnego.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w chłodnym miejscu między 10°C - 39°C. Otwartych pudełek nie należy narażać na działanie światła słonecznego lub oświetlenia fluorescencyjnego, aby zapobiec przebarwieniom.

Dobrej jakości rękawice nitylowe zapewniają doskonałą barierę biologiczną.

IMPORTER:

LONTEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ligocka 55, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Poland

PRODUCENT:

GLOVEMAS, No 36 Medan Stesen 18/12 Station 18, Ipoh Perak 31650, Malaysia

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL:

GlobalRoadSystems BV, Engelenburgstraat 17, 7391 AM Twello, The Netherlands